

Autoclave CL/B TANCY TOUCH 2Lts.



Cod. 4922

Autoclave mini clase B, ultra rápido, de alto rendimiento,

Características :

- Pantalla táctil de 4,3 pulgadas de operación intuitiva
- Identifica programas especiales de HIV, VHB y Priones
- Programas de prueba Bowie & Dick, Helix y Vacuum.
- Dispone de control electrónico que regula la oscilación de T° de tan solo 0,1°C y presión de 0,001Bar.
- Ciclo rápido resultante del calentamiento de membrana, esteriliza a 121°C o 134°C
- Secado con potente bomba de vacío.
- Diseño de cajón, 1 bandeja, cámara de aleación de aluminio médico 6061, liviana y duradera, resistente a la corrosión.
- Opera con una presión mínima de 0,96Bar y máxima de 2,3Bar.
- Cámara de acero inoxidable, Opera con 121°C ó 134°C.
- Esteriliza entre 4 y 20 minutos, más el tiempo de precalentamiento y secado al vacío.
- Programas de Esterilización: N GRAVITACIONAL, S CON 1 PRE-VACIO ó B CON 3 PRE-VACIOS.

Modelo	Voltaje/Potencia	Cámara	Dimensiones	Paquete	Peso neto
TANCY TOUCH 2L	220V/1800W	192.5X45.5X300mm	530X450x170mm	750X520X230mm	23kg

La nueva interfaz de usuario hace que todo el sistema operativo sea más inteligente.
El control táctil con recordatorio inteligente proporciona una experiencia de uso más sencilla.



Control táctil



Recordatorio inteligente



Material de la cámara: Aleación de aluminio 6061 de grado médico. Ligera y duradera, fácil de recubrir, alta resistencia y alta resistencia a la corrosión.

Membranas de calentamiento divididas en la cámara, calentamiento más rápido y uniforme.
Diseño en forma de cajón, operación simple y fácil.
Sistema de bloqueo del motor, mantiene la puerta cerrada durante todo el ciclo, sin importar si la presión es positiva o negativa.

Esterilización

Programa	Temperatura	Presión	Vacíos	Esterilización	Secado	Desde Frio	Desde caliente
N Class	134 °C	210kPa	0	4min	0	8min	6min
S Class	134 °C	210kPa	1	4min	0	10min	8min
B Class 134°C	134 °C	210kPa	3	4min	9min	25min	23min
B Class 121°C	121 °C	110kPa	3	20min	18min	45min	43min

REV.20260223