

Alginato Jeltrate Dustless 410gr.



Alginato libre de polvo (Dustless), ideal para impresiones dentales de alta precisión, en trabajos de prótesis totales o parciales removibles, en la confección de modelos de estudios para trabajo de ortodoncia, también útil en moldes para la confección de restauraciones unitarias y múltiples, coronas y puentes fijos.

Los Alginatos no deben mezclarse o utilizarse junto con otros alginatos, ya que pueden cambiar sus propiedades.

Cód..4741

Precauciones:

- Para uso odontológico
- Contiene sílice, la inhalación del polvo seco puede ser perjudicial para la salud.
- Se recomienda manipular con máscara de protección facial.
- Se recomienda utilización de lentes de protección durante la manipulación.
- Las impresiones deben ser lavadas y desinfectadas.

Accesorios:

- 1 cuchara medidor para polvo
- 1 frasco medidor de agua graduado en 3 niveles

Preparación :

- Medir la cantidad de agua y de Jeltrate Dustless necesarios para el moldeado, asegurándose de que no haya espacios vacíos en la cuchara en el momento de la dosificación del polvo.
- Pasar la espátula en la mezcla por aproximadamente 1 minuto hasta que quede homogénea.
- Colocar la mezcla en la cubeta e insertar la cubeta en la cavidad bucal, comprimir levemente.
- Hacer las correcciones musculares y mantener la plancha firme durante 1 minuto y 20 segundos.
- Después de tomar presa, quitar la impresión de la boca y enjuagarla en agua corriente.

| Tiempo de manipulación | Tiempo para colocar la mezcla en la cubeta | Tiempo de la cubeta en la boca | Tiempo total de presa |
|------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|
| 1 minuto | 20 segundos | 1 minuto y 20 segundos | 2 minutos y 40 segundos |

Rev20250704